

BIOTEKNE s.r.l.  
Via della Bastia, 9  
40033 Casalecchio di Reno (BO)  
Tel. +39 051 565211 • Fax +39 051 6182524  
e-mail: info@biotekne.it  
C.F.: 10826570151 • P.IVA: 02027231204  
R.I. BO: 65263/1999 • R.E.A.: 388619 • C.S.: € 80.000,00 i.v.


## SCHEDA TECNICA AGHI CANNULA MESORELLE



Questa scheda tecnica riguarda gli aghi ipodermici monouso prodotti dalla ditta M.V. srl, sede legale in Via F.lli Cervi 7, 46023 Gonzaga (MN) e sede operativa in via G. Dossetti 5/7 46023 Gonzaga (MN) e commercializzati dalla ditta Biotekne srl via della Bastia 9 40033 Casalecchio di Reno (BO).

1	<b>Nome Prodotto</b>	Ago cannula Mesorelle		
2	<b>Misure e tipologie</b>	Vedi tabella riportata sotto		
3	<b>Normative di riferimento</b>	1. ISO 7864 "Sterile hypodermic needles for single use" 2. ISO 9626 "Stainless steel needle tubing for manufacture of medical device"		
4	<b>Materiali</b>	Parti	Materiali	Standard applicato
		Ago	Acciaio: SUS304	JIG S 4305
		Attacco (hub)	Polyethylene (MG03MA)	ISO10993
		Cappuccio protettivo	Polyethylene (J801)	ISO10993
	Collante	One component type Epoxy	-	
5	<b>Avvertenze</b>	1. Durante il trasporto tenere lontano da temperature elevate, luce diretta ed acqua, proteggere da forti vibrazioni o shock. 2. Conservare all'interno tenendo lontano da alte temperature, elevato tasso di umidità, fonti di luce diretta ed acqua.		

BIOTEKNE s.r.l.  
Via della Bastia, 9  
40033 Casalecchio di Reno (BO)  
Tel. +39 051 565211 • Fax +39 051 6182524  
e-mail: info@biotekne.it  
C.F.: 10826570151 • P.IVA: 02027231204  
R.I. BO: 65263/1999 • R.E.A.: 388619 • C.S.: € 80.000,00 i.v.

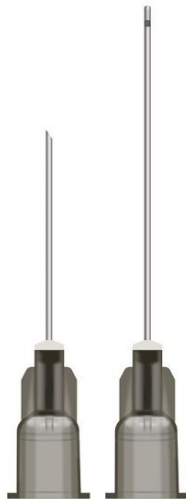

## DESCRIZIONE PRODOTTO

L'ago cannula Mesorelle è una microcannula ovvero un ago ipodermico flessibile con punta chiusa, arrotondata e atraumatica. La sua apertura è in posizione laterale.

L'ago cannula Mesorelle viene utilizzato in associazione ad un ago classico consentendo di creare l'apertura attraverso la quale il tubo dell'ago cannula Mesorelle viene introdotto nel derma del paziente. L'attacco Luer Lock dell'ago cannula Mesorelle consente un collegamento facile e sicuro a qualsiasi siringa Luer Lock.

L'ago cannula Mesorelle e il relativo ago classico sono venduti congiuntamente nella stessa confezione.

Misure	REF	Confezionamento
22Gx50mm & ago 21Gx25mm	M0222G50	Scatola 25 pz.
22Gx70mm & ago 21Gx25mm	M0222G70	Scatola 25 pz.
25Gx40mm & ago 23Gx25mm	M0225G40	Scatola 25 pz.
25Gx50mm & ago 23Gx25mm	M0225G50	Scatola 25 pz.
27Gx40mm & ago 26Gx13mm	M0227G40	Scatola 25 pz.
30Gx30mm & ago 27Gx13mm	M0230G30	Scatola 25 pz.

L'ago cannula Mesorelle è un dispositivo medico monouso.

L'ago cannula Mesorelle ha una validità di 5 anni dopo la data di sterilizzazione ad ossido di etilene.

### DESTINAZIONE D'USO

L'ago cannula Mesorelle viene usato per irrigazioni o iniezioni intradermiche.

### INDICAZIONI D'USO

L'ago cannula Mesorelle è indicato come cura nelle terapie basate su irrigazioni o iniezioni intradermiche.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Reumatologia, traumatologia, medicina sportiva e medicina estetica.

### SOGGETTI E CONDIZIONI MEDICHE

Non ci sono restrizioni di età o genere in merito all'uso dell'ago cannula Mesorelle, esiste solo una condizione riguardante il peso: il paziente deve pesare più di 16 kg.

L'ago cannula Mesorelle è indicato per irrigazioni o iniezioni intradermiche.

Regulatory Data

Fabbricante	M.V. Srl, via F.lli Cervi 7, 46023 Gonzaga (MN) - Italy
Ente notificato	Numero CE: 0373
Certificato CE	QPZ-1916-19
CND	A019006
Nomenclatura doganale	90183210
Ftalati	Not used in the manufacturing process.
Latex	Not made with natural rubber latex.